

Mode d'emploi – Test de grossesse bandelette

Vous devez recueillir un échantillon d'urine dans un récipient propre et sec (tel qu'une tasse en plastique).

Pour commencer, ouvrez la poche scellée par la déchirure le long de l'entaille. Enlevez le test de grossesse de la poche quand vous êtes prêt à l'employer.

Immergez la bande dans l'urine avec l'extrémité de flèche se dirigeant vers l'urine. N'immergez pas après la ligne 'MAX'. Enlevez le test de grossesse après 10 secondes et placez le test, à plat, sur une surface propre, sèche, imperméable.

N'immergez pas le test dans l'urine plus de 10 secondes.

